

OptraContact

Nástroj pro vytvoření bodu kontaktu

Návod k použití

Popis

Tento nástroj OptraContact napomáhá zubnímu lékaři dosáhnout během výstavby výplně II. třídy těsných a správně konturovaných aproximálních kontaktů.

Pomocí nástroje OptraContact se během fotopolymerace pásková matrice přitlačuje k vedlejšímu zubu. Díky vidlicovitému tvaru nástroje se vytvoří kompozitní můstek přesně v požadovaném místě kontaktu. Tento můstek napomáhá stabilizovat matrici a výborně umožňuje vytvarovat výplň no konečných kontur, a hlavně vytvořit těsné a správně umístěné proximální kontakty.

Indikace

Zatímco OptraContact Molar (zelený nástroj) je specificky vytvořen pro velké kavity, OptraContact Premolár (modrý nástroj) je navržen pro malé výplně II. třídy.

Kontraindikace

Pokud je vidlicovitý nástroj příliš široký pro konkrétné preparaci (proximální box), není možné tento nástroj použít.

Použití

- 1) Po preparaci kavity byla nasazena a zaklínkována pásková matrice.
- 2) Po aplikaci adhesivního systému je nanesena první vrstva kompozitu a adaptována vhodným nástrojem k okrajům kavity.
- 3) Nástroj OptraContact se vnoří podél matrice do kompozitního materiálu a přitlačí k vedlejšímu zubu. Kompozitní materiál v kavitě vytvoří bod kontaktu.
- 4) Fotopolymeruje se první vrstva kompozitu dle návodu výrobce, přičemž se nástroj přidržuje ve stejné pozici.
- 5) Nástroj se odstraní. Byl vytvořen bod kontaktu (můstek) z kompozitního materiálu.

Poznámky

- V případě velmi hlubokých kavit se doporučuje použití OptraContact při aplikaci druhé nebo třetí vrstvy.
- Nástroj OptraContact je možno autoklávovat.
- Nástroj OptraContact by se neměl dále používat, pokud došlo k deformaci nebo silnému poškrábání vidlicovitého zakončení. Jinak by potom bylo velmi obtížné vyjmout tento nástroj po vytvrzení kompozitu.
- Při manipulaci s tímto nástrojem by se mělo zamezit příliš tlačít příliš velkou silou, protože přídavné utažení páskové matrice nebo přímý tlak na zub může poškodit zbývající strukturu zubu.
- Je důležité zaplnit pečlivě kompozitem obě prohlubně, které se vytvoří po obou stranách můstku.

Udržujte z dosahu dětí!

Jen pro použití ve stomatologii!

Datum vypracování informací o použití:

04/2004

Výrobce :

Ivoclar Vivadent AG

FL-9494 Schaan Liechtenstein

*Tento materiál byl vyvinut pouze pro užití ve stomatologii.
Zpracováván musí být striktně podle návodu použití. Za škody
způsobené jiným nebo nesprávným použitím nepřejímá výrobce
žádnou zodpovědnost.*

*Tímto je uživatel zodpovědný za otestování materiálu z
hlediska jeho vhodnosti při použití materiálu pro jiné účely
než je uvedeno v návodu k použití.*

FANG-Dent, s.r.o.
Pod Kalváriou 1278
955 01 Topolčany
tel:038/53214 29
fax:038/53230 90
dental@fang.sk