

OptraSculpt

Modelovací nástroj na kompozitní materiály

Návod k použití

Popis

Tento systém OptraSculpt se skládá ze dvou nástrojů a vyměnitelných elastických modelovacích tvarově 6-ti různých koncovek. OptraSculpt umožňuje snadnou aplikaci a manipulaci všech kompozitních materiálů hlavně díky nízké adhezi modelovacích koncovek ke kompozitním materiálům.

Tvary

Vlastní nástroje

OptraSculpt jednostranný s kovovou lopatkou

OptraSculpt oboustranný

Modelovací koncovky

Doporučené aplikace

1. Válec

První vrstva u I. a II. třídy.

2. Zkosený válec

Okrajové lišty, cervikální okraje výplně V. třídy.

3. Lopatka

Výplně V. třídy, všechny labiální povrchy (nebo obecně hladké povrchy). Také doporučována pro odstranění přebytečného cementu.

4. Kulička

Vytvoření konkávního tvaru výplně z linguální strany frontálních zubů.

5. Špička

Vytváření detailní anatomie jako jsou jamky a fisury, linguální kontury, refining margins.

6. Pyramida

Vytváření detailní anatomie jako jsou jamky a figury a další detailní morfologie.

Indikace

Modelování a konturování anatomie u přímých kompozitních výplní.

Použití

Výběr a nasazení vhodné modelovací koncovky na nástroj. Pokud není použita kopule s přímým vytlačení materiálu do kavity, použije se pro nanesení materiálu do kavity konec s kovovou lopatkou. Pomocí modelovacích koncovek se adaptuje, konturuje a modeluje použitý materiál.

Různé tvary koncovek mohou být použity následovně:

Válec

Modelovací koncovky ve tvaru válce jsou používány pro umístění a adaptování první vrstvy materiálu u kavit I. a II. třídy. Dosahují optimální adaptace k zubu.

Zkosený válec

Modelovací koncovky ve tvaru zkoseného válce jsou používány pro výplně V. třídy, labiální a bukální povrchy a také okluzální povrchy.

Lopatka

Modelovací koncovky ve tvaru lopatky jsou hlavně vhodné pro konturování labiálních povrchů výplní ve frontálním úseku (III. a IV. třída) a výplní V. třídy.

Kulička

Modelovací koncovky ve tvaru kuličky mohou být použity pro vytvoření konkávního vytvarování linguálního povrchu u výplní ve frontálním úseku (III. a IV. třída)

Špička

Modelovací koncovky ve tvaru špičky byly vyvinuty pro konturování a modelování okluzální anatomie (I. a II. třída), jakož i pro lingvální povrchy frontálních zubů (III. a IV. třída).

Pyramida

Modelovací koncovky ve tvaru pyramidy jsou doporučovány pro vytvoření figur (I. a II. třída) a tvorbu detailní morfologie.

Poznámky

- OpraSculpt držák je možno autoklávovat.
- Modelovací koncovky jsou jednorázové a musí se před sterilizací v autoklávu vyjmout.

Protože rozměrově malé součásti systému nesou riziko možného vdechnutí, je doporučeno n použití kofferdamu.

**Udržujte z dosahu dětí!
Jen pro použití ve stomatologii!**

**Datum vypracování informací o použití:
05/2004**

Výrobce :

Ivoclar Vivadent AG
FL-9494 Schaan Liechtenstein

*Tento materiál byl vyvinut pouze pro užití ve stomatologii.
Zpracováván musí být striktně podle návodu použití. Za škody
způsobené jiným nebo nesprávným použitím nepřejímá výrobce
žádnou zodpovědnost.*

*Tímto je uživatel zodpovědný za otestování materiálu z
hlediska jeho vhodnosti při použití materiálu pro jiné účely
než je uvedeno v návodu k použití.*

FANG-Dent, s.r.o.
Pod Kalváriou 1278
955 01 Topolčany
tel:038/53214 29
fax:038/53230 90
dental@fang.sk